

# MECTRON PROPHYLAXE P3 INSTRUMENT - FÜR DIE VOLLUMFÄNGLICHE ZAHNREINIGUNG




**neu!**

mectron

## ➤ NEUES PERIO INSTRUMENT P3

Speziell für die sanfte und effektive Entfernung von sub- und supragingivalem Biofilm entwickelt.

- Seine schlanke Form ermöglicht einen einfachen Zugang in tiefe parodontale Taschen und interproximale Räume in allen Quadranten.
- Ist dank der linearen Bewegung minimal invasiv für Weichgewebe sowie Wurzelzement und bewahrt zudem das Epithel.
- Für die beste interproximale und subgingivale Reinigung.
- Entfernt effektiv extrinsische Verfärbungen.
- Gibt dem Anwender ein sicheres Gefühl während der interproximalen, supra- und subgingivalen Instrumentierung und einer optimalen intraoperativen Kontrolle.
- Eine angenehme und komfortable Behandlung für Patienten dank der SOFT MODE-Funktion.

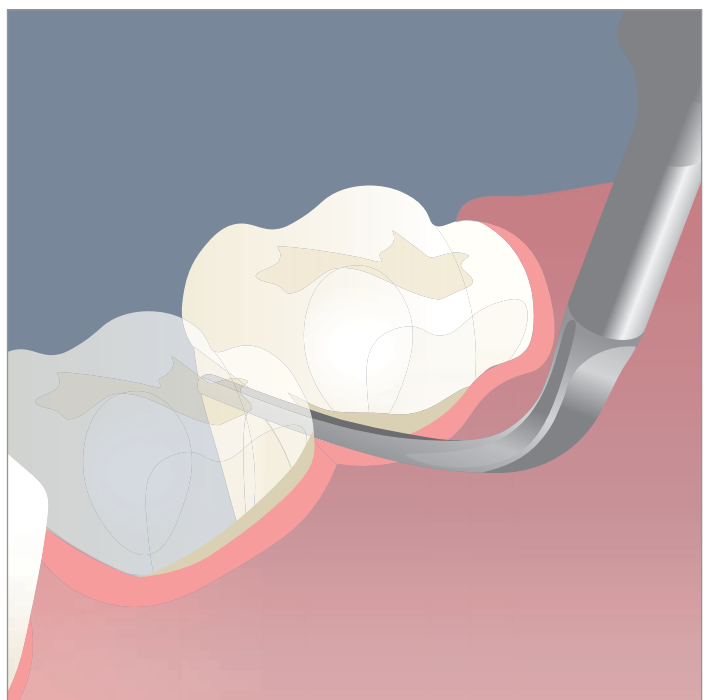


## ➤ RICHTIGE VERWENDUNG DES INSTRUMENTS P3

Durch die lineare Instrumentenbewegung werden das Weichgewebe sowie der Zahnfleischrand geschützt.

Dabei sollte die Kraft, die die Spitze auf den Zahn ausübt, federleicht sein.

Es wird empfohlen, die Leistung auf einem niedrigen Level mit mittlerer Flüssigkeitszufuhr einzustellen. Falls verfügbar, aktivieren Sie die SOFT MODE-Funktion, die die Amplitude der Ultraschallschwingungen reduziert und gleichzeitig eine sanfte und effiziente Bewegung ermöglicht.

Empfindlichere Patienten profitieren sehr von dieser Funktion, was ihr Vertrauen in ihren Zahnarzt stärkt.

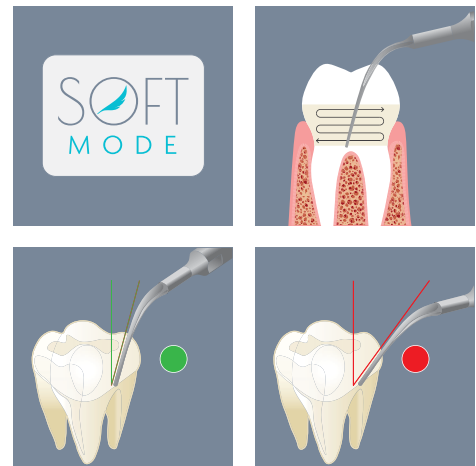

mit freundlicher Genehmigung von Dr. Giacomo Oldoini (La Spezia, Italien)

Unsere Anwender bestätigen die Wirksamkeit, Sicherheit und den Komfort in den unterschiedlichen Situationen.

*„Seine schlanke und längliche Form ermöglicht einen einfachen Zugang zu den schwer zugänglichen Bereichen. Man erhält die besten Ergebnisse bei der Entfernung von Biofilm sowohl im supra-gingivalem Bereich als auch in parodontalen Taschen; es garantiert einen maximalen Schutz für das Weichgewebe. Besonders gut eignet sich das Instrument für die Behandlung von kieferorthopädischen Patienten; es funktioniert hervorragend beim Einsatz um die Klammern herum und verhindert das Risiko diese zu beschädigen.“*

Dr. Stefano Checchi, Turin, Italien

*„Dank seiner Eigenschaften eignet es sich besonders für die Vorbehandlung und die parodontale Therapie. Lang und gebogen, ermöglicht es einen einfachen Zugang in parodontale Taschen mit unterschiedlichen Tiefen, auch bei dünnen Zahnfleischphänotypen. Das Instrument ist besonders geeignet für das subgingivale Biofilmmangement.“*

Dr. Giacomo Oldoini, La Spezia, Italien

## ➤ DETAILS ZUM INSTRUMENT P3



**INSTRUMENT P3** Art.-Nr. 02970003-001

schlank und glatt wie eine Sonde

**Indikationen:** supra- und subgingivale Konkrementen- und Biofilmentfernung und aus interproximalen Räumen

## DREHMOMENTSCHLÜSSEL K10

Jedes Instrument wird mit seinem eigenen Drehmomentschlüssel geliefert, um Kontaminationen zu vermeiden und die Aufbereitungszeiten zu reduzieren.



mectron Deutschland Vertriebs GmbH  
Waltherstr. 80/2001, 51069 Köln, tel +49 221 492015-0  
fax +49 221 492015-29, info@mectron.de, www.mectron.de



© Copyright mectron S.p.A., Carasco, Italien  
Alle Rechte vorbehalten. Text, Bilder und Grafiken der mectron-Broschüren unterliegen dem Schutz des Urheberrechts und anderer Schutzgesetze. Ohne schriftliche Zustimmung der mectron S.p.A. dürfen die Inhalte nicht zu kommerziellen Zwecken kopiert, verbreitet, verändert oder Dritten zugänglich gemacht werden.

**mectron**  
medical technology