

PIEZOSURGERY® 3 Montage

Anschließen des Netzkabels

1



Anschließen des Fußanlassers

2



Anschließen des Handstückschlauchs

3



Verbinden des Pumpenschlauchs mit dem Handstückschlauch

4




Verbinden des Infusionsbestecks mit dem Pumpenschlauch

5




Einlegen des Pumpenschlauches (größerer Durchmesser) in die Peristaltikpumpe

6

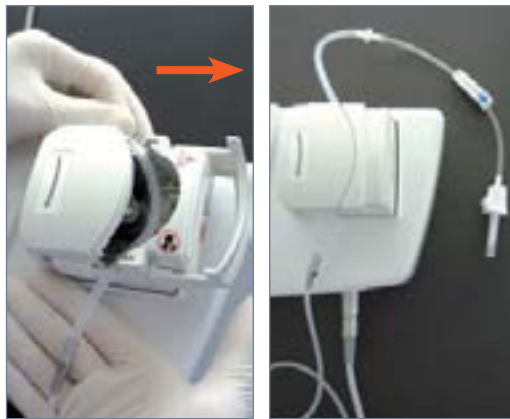

Einsetzen der Handstückhalterung und der Halterung des Flüssigkeitsbehälters

7

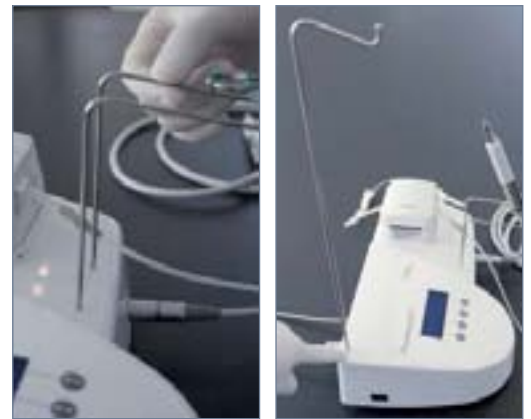


Befestigen des Instruments mit dem Drehmomentschlüssel bis ein Klick zu hören ist

8



Einschalten des PIEZOSURGERY®

9

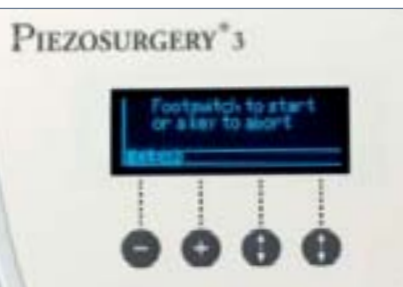

Achtung:

Befolgen Sie die Reinigungs- und Sterilisationsvorgaben der Bedienungsanleitung sorgfältig (§ 06.0).

- Betätigen Sie die CLEAN Funktion nach jeder Behandlung!
- Verwenden Sie kein Wasserstoffperoxid zur Instrumentendesinfektion. Benutzen Sie ausschließlich PH neutrale Desinfektionslösungen.
- Trocknen Sie die Instrumente vor dem Sterilisieren vollständig mit Druckluft!